


Guía Rápida de Uso

Cama B-216 4 Planos

Cama de Operación Manual

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca **LOS PINOS®** es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso.

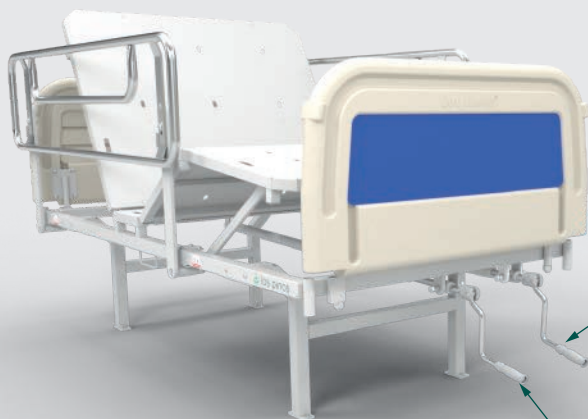

Movimiento de los Planos de la Cama


Identifique la manivela correspondiente al plano que se quiere inclinar y gire en sentido de las manecillas del reloj para subir los planos y al contrario de las manecillas del reloj para bajar el plano deseado.



Ascenso Pies




Ascenso Espaldar

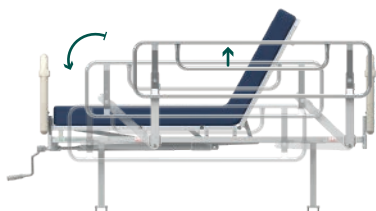

Subir Las Barandas

Hale hacia arriba la baranda y haga girar la branda hasta que quede en su posición máxima, desienda la baranda hasta que el pin asegure en el brazo de la baranda.

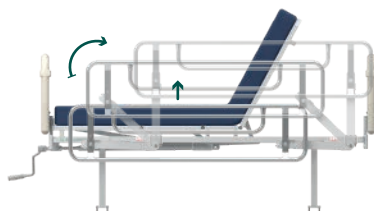

Bajar Las Barandas

Hale hacia arriba la baranda, soltando el seguro, haga girar la branda hasta que esta quede en su posición mínima.



1. Posición segura de ingreso y egreso de paciente: Cama en superficie plana.
2. Siempre asegúrese que no hayan obstáculos (personas, objetos, accesorios, entre otros), antes de cualquier movimiento de la cama.
3. La cama debe tener las barandas arriba siempre que se encuentre en uso.
4. Para la correcta limpieza de la cama siga las instrucciones al respaldo.

Protocolo de Limpieza

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca LOS PINOS® es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso.



Utilizar químicos de limpieza a base de:

- A. Peróxido Orgánico.
- B. Ácido Acético.
- C. Biguadina Polimérica.
- D. Tensoactivos Aniónicos.



Nunca Utilizar:

- A. Cloro
- B. Hipoclorito
- C. Amonios Cuaternarios
- D. Alcalino Clorado

- 1** . Seguir las instrucciones de correcta titulación del químico dadas por el fabricante del mismo (% de concentración).



- 2** : Bajo ninguna circunstancia aplique los químicos sin ser diluidos.



- 3** . Humedecer (sin saturar) un paño limpio con el químico a utilizar. Verifique que este no quede goteando.



- 4** . Aplicar el producto sobre la zonas de mayor contacto con el paciente y/o los agentes contaminantes. Dejar reposar por un tiempo no mayor a 1 minuto.



- 5** . Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.



- 6** . En caso de tener desprendimiento de pintura por cualquier causa, comuníquese con LOS PINOS para realizar la reparación y evitar oxidación química.



- 7** : En caso de identificar una mancha de óxido sin desprendimiento de pintura, humedezca un paño con agua y frote con fuerza hasta eliminar la mancha superficial. Verifique que la superficie quede completamente seca.



- 8** . No realice la limpieza del equipo utilizando elementos a presión. (Mangueras o hidrolavadoras).



- 9** . Para la limpieza de los componentes electrónicos, desconecte el equipo y limpie con un paño húmedo, garantizando que no se almacenen líquidos dentro de las conexiones. Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.



En caso de presentar novedades con las protecciones superficiales o componentes comuníquese con Industrias Metálicas Los Pinos. No seguir las recomendaciones indicadas podrá causar la pérdida de garantía del equipo.

PBX
(57 604) 372 30 31

Línea Gratuita Nacional
01 8000 180 654

Escribanos a
serviciotecnico@lospinos-sa.com

Nuestra Página Web
www.lospinos.com.co