

Guía Rápida de Uso


Silla Multipropósito SMM-200

los pinos
Mejora tu Vida


Silla de Operación Manual

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca **LOS PINOS®** es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso.

Controles Manuales

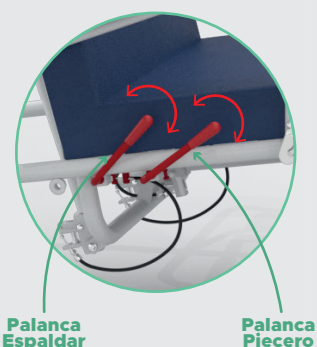

Posición Segura de Ingreso y Egreso

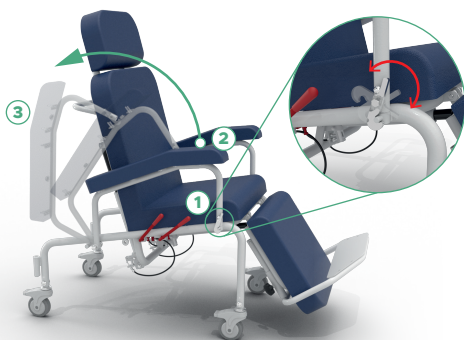

Para retraer el descanso brazos, libere el trinquete (1) y levante el descanso brazos (2) llevándolo hasta el final de su recorrido (3) en la parte de atrás de la silla.

Bajo ninguna circunstancia sentarse en la sección pies de la silla.

Accionamiento del Freno

Freno Desactivado



Freno Activado



Para desplazar la silla asegúrese que no esté frenada.



Para evitar daños en la tapicería y/o la estructura de la silla, asegúrese que haya como mínimo 100^{cm} de espacio libre entre el espaldar de la silla y el objeto o muro más cercano.



1. Antes de realizar cualquier movimiento verifique que el atril porta suero no choque con ningún objeto, pared o techo.
2. Siempre asegúrese que no hayan obstáculos (personas, objetos, accesorios, entre otros), antes de cualquier movimiento de la silla.
3. La silla debe tener los apoyabrazos abajo siempre que se encuentre en uso.
4. Para la correcta limpieza de la silla siga las instrucciones al respaldo.

Protocolo de Limpieza

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca LOS PINOS® es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso.



Utilizar químicos de limpieza a base de:

- A. Peróxido Orgánico.
- B. Ácido Acético.
- C. Biguadina Polimérica.
- D. Tensoactivos Aniónicos.



Nunca Utilizar:

- A. Cloro
- B. Hipoclorito
- C. Amonios Cuaternarios
- D. Alcalino Clorado

- 1** : Seguir las instrucciones de correcta titulación del químico dadas por el fabricante del mismo (% de concentración).



- 2** : Bajo ninguna circunstancia aplique los químicos sin ser diluidos.



- 3** : Humedecer (sin saturar) un paño limpio con el químico a utilizar. Verifique que este no quede goteando.



- 4** : Aplicar el producto sobre las zonas de mayor contacto con el paciente y/o los agentes contaminantes. Dejar reposar por un tiempo no mayor a 1 minuto.



- 5** : Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.



- 6** : En caso de tener desprendimiento de pintura por cualquier causa, comuníquese con LOS PINOS para realizar la reparación y evitar oxidación química.



- 7** : En caso de identificar una mancha de óxido sin desprendimiento de pintura, humedezca un paño con agua y frote con fuerza hasta eliminar la mancha superficial. Verifique que la superficie quede completamente seca.



- 8** : No realice la limpieza del equipo utilizando elementos a presión. (Mangueras o hidrolavadoras).



- 9** : Para la limpieza de los componentes electrónicos, desconecte el equipo y limpie con un paño húmedo, garantizando que no se almacenen líquidos dentro de las conexiones. Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.



En caso de presentar novedades con las protecciones superficiales o componentes comuníquese con Industrias Metálicas Los Pinos. No seguir las recomendaciones indicadas podría causar la pérdida de garantía del equipo.

PBX
(57 604) 372 30 31

Línea Gratuita Nacional
01 8000 180 654

Escribanos a
serviciotecnico@lospinos-sa.com

Nuestra Página Web
www.lospinos.com.co