


Guía Rápida de Uso

Mesa de Cirugía MC-805^{TE}

los pinos
Mejora tu Vida

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca **LOS PINOS**® es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso.

Dispositivo RCP en el Espaldar

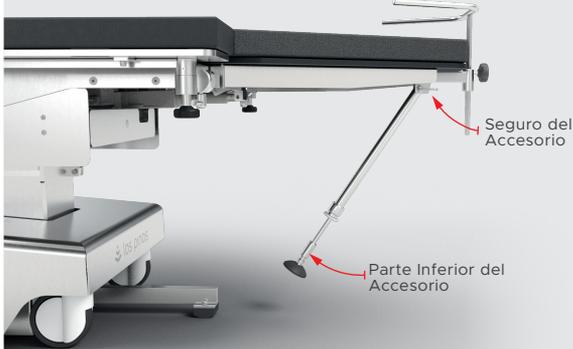

Para usarlo se necesita:

1. Posicionar la mesa en altura mínima.
2. Girar el seguro para liberar el accesorio.
3. Dejar girar el accesorio hasta que esta pieza se encuentre vertical.
4. Girar el eje de la parte inferior y dejarlo salir hasta que toque el suelo.
5. Girar la parte inferior para ajustar el accesorio cuando el tope toque el suelo.

Accionamiento del Freno



DIRIGIR



LIBRE



FRENO



Para desplazar la mesa asegúrese que no esté frenada.

Control de Mano



**Subir
Espaldar**



**Bajar
Espaldar**



**Bloqueo de
Funciones**



**Trasladar
Mesa**



**Retraer
Mesa**



CPR



**Subir
Mesa**



**Bajar
Mesa**

Debe mantener presionado el botón hasta llegar a la posición deseada.



1. Antes de realizar cualquier movimiento verifique que la mesa no choque con ningún objeto, pared o techo.
2. Siempre asegúrese que no hayan obstáculos (personas, objetos, accesorios, entre otros), antes de cualquier movimiento de la mesa.
3. La mesa debe estar frenada siempre que se encuentre en uso.
4. Para la correcta limpieza de la mesa siga las instrucciones al respaldo.

Protocolo de Limpieza

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca LOS PINOS® es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso.



Utilizar químicos de limpieza a base de:

- A. Peróxido Orgánico.
- B. Ácido Acético.
- C. Biguadina Polimérica.
- D. Tensoactivos Aniónicos.



Nunca Utilizar:

- A. Cloro
- B. Hipoclorito
- C. Amonios Cuaternarios
- D. Alcalino Clorado

- 1** : Seguir las instrucciones de correcta titulación del químico dadas por el fabricante del mismo (% de concentración).



- 2** : Bajo ninguna circunstancia aplique los químicos sin ser diluidos.



- 3** : Humedecer (sin saturar) un paño limpio con el químico a utilizar. Verifique que este no quede goteando.



- 4** : Aplicar el producto sobre las zonas de mayor contacto con el paciente y/o los agentes contaminantes. Dejar reposar por un tiempo no mayor a 1 minuto.



- 5** : Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.



- 6** : En caso de tener desprendimiento de pintura por cualquier causa, comuníquese con LOS PINOS para realizar la reparación y evitar oxidación química.



- 7** : En caso de identificar una mancha de óxido sin desprendimiento de pintura, humedezca un paño con agua y frote con fuerza hasta eliminar la mancha superficial. Verifique que la superficie quede completamente seca.



- 8** : No realice la limpieza del equipo utilizando elementos a presión. (Mangueras o hidrolavadoras).



- 9** : Para la limpieza de los componentes electrónicos, desconecte el equipo y limpie con un paño húmedo, garantizando que no se almacenen líquidos dentro de las conexiones. Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.



En caso de presentar novedades con las protecciones superficiales o componentes comuníquese con Industrias Metálicas Los Pinos. No seguir las recomendaciones indicadas podría causar la pérdida de garantía del equipo.

PBX
(57 604) 372 30 31

Línea Gratuita Nacional
01 8000 180 654

Escríbanos a
serviciotecnico@lospinos-sa.com

Nuestra Página Web
www.lospinos.com.co