


Guía Rápida de Uso

Silla de Ruedas A104



Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca **LOS PINOS®** es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso.

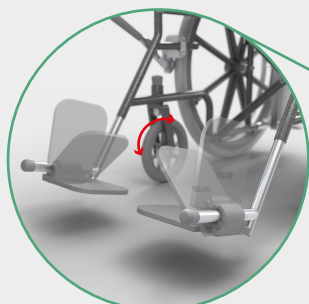

Apoyapiés Abatible



Accionamiento del Freno


La silla de ruedas tiene un freno de bloqueo en cada lado. Solo se deben accionar los frenos cuando la silla está totalmente quieta.

Para hacerlo, empuje la palanca hacia adelante (1) hasta que queden sujetos y no retrocedan. Notará que la palanca encaja en su lugar al apretar los frenos (2).

Freno Desactivado



Freno Activado

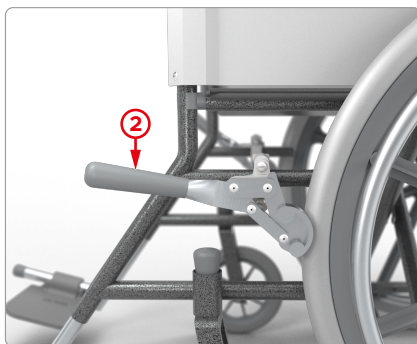

Para desplazar la silla asegúrese que no esté frenada.



1. Antes de realizar cualquier movimiento verifique que los accesorios no choquen con ningún objeto, pared o techo.
2. Siempre asegúrese que no hayan obstáculos (personas, objetos, accesorios, entre otros), antes de cualquier movimiento de la silla.
3. La silla debe tener los apoyapiés abajo siempre que se encuentre en uso.
4. Para la correcta limpieza de la silla siga las instrucciones al respaldo.

Protocolo de Limpieza

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca LOS PINOS® es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso.



Utilizar químicos de limpieza a base de:

- A. Peróxido Orgánico.
- B. Ácido Acético.
- C. Biguadina Polimérica.
- D. Tensoactivos Aniónicos.



Nunca Utilizar:

- A. Cloro
- B. Hipoclorito
- C. Amonios Cuaternarios
- D. Alcalino Clorado

- 1** : Seguir las instrucciones de correcta titulación del químico dadas por el fabricante del mismo (% de concentración).



- 2** : Bajo ninguna circunstancia aplique los químicos sin ser diluidos.



- 3** : Humedecer (sin saturar) un paño limpio con el químico a utilizar. Verifique que este no quede goteando.



- 4** : Aplicar el producto sobre las zonas de mayor contacto con el paciente y/o los agentes contaminantes. Dejar reposar por un tiempo no mayor a 1 minuto.



- 5** : Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.



- 6** : En caso de tener desprendimiento de pintura por cualquier causa, comuníquese con LOS PINOS para realizar la reparación y evitar oxidación química.



- 7** : En caso de identificar una mancha de óxido sin desprendimiento de pintura, humedezca un paño con agua y frote con fuerza hasta eliminar la mancha superficial. Verifique que la superficie quede completamente seca.



- 8** : No realice la limpieza del equipo utilizando elementos a presión. (Mangueras o hidrolavadoras).



- 9** : Para la limpieza de los componentes electrónicos, desconecte el equipo y limpie con un paño húmedo, garantizando que no se almacenen líquidos dentro de las conexiones. Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.



En caso de presentar novedades con las protecciones superficiales o componentes comuníquese con Industrias Metálicas Los Pinos. No seguir las recomendaciones indicadas podría causar la pérdida de garantía del equipo.

PBX
(57 604) 372 30 31

Línea Gratuita Nacional
01 8000 180 654

Escribanos a
serviciotecnico@lospinos-sa.com

Nuestra Página Web
www.lospinos.com.co