

Guía Rápida de Uso

Camilla CS4 RX

Camilla de Operación Manual

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca **LOS PINOS®** es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso.




Guía Rápida de Uso

Camilla CS4 RX

Camilla de Operación Manual

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca **LOS PINOS®** es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso.

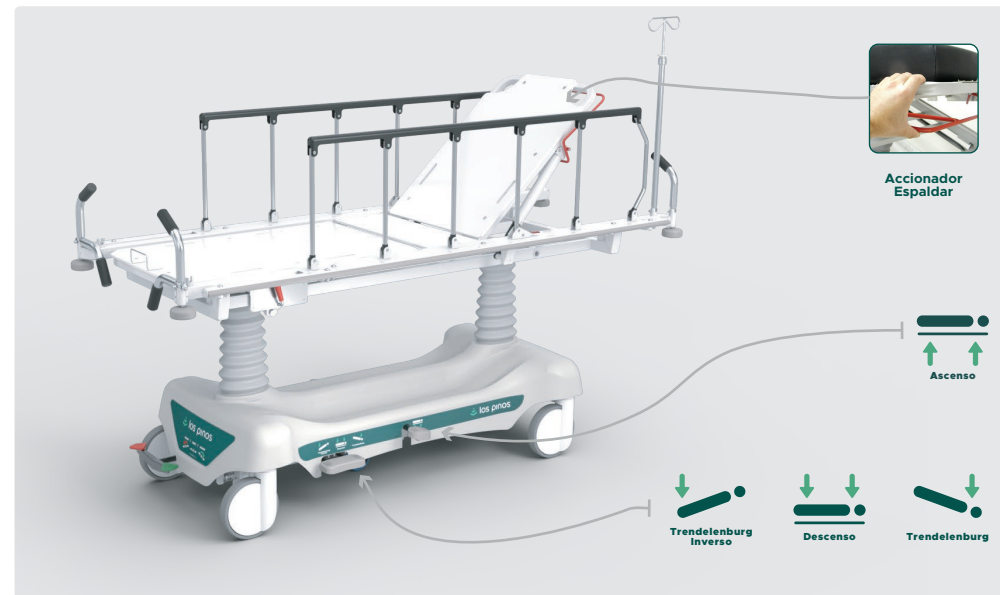

Subir Las Barandas

Hale hacia arriba hasta que estas aseguren firmemente en el trinquete.

Bajar Las Barandas

Haga presión en el accionador, sosteniendo la baranda para que no vaya a caer bruscamente.

Deje caer la baranda permitiendo que se posicione sobre el tendido.



Para desplazar la camilla asegúrese que no esté frenada.



Subir Las Barandas

Hale hacia arriba hasta que estas aseguren firmemente en el trinquete.

Bajar Las Barandas

Haga presión en el accionador, sosteniendo la baranda para que no vaya a caer bruscamente.

Deje caer la baranda permitiendo que se posicione sobre el tendido.



Para desplazar la camilla asegúrese que no esté frenada.



1. Posición segura de ingreso y egreso de paciente: Camilla en Altura Mínima.
2. Antes de realizar cualquier movimiento verifique que el atril porta suero no choque con ningún objeto, pared o techo.
3. Siempre asegúrese que no hayan obstáculos (personas, objetos, accesorios, entre otros), antes de cualquier movimiento de la camilla.
4. La camilla debe tener las barandas arriba siempre que se encuentre en uso.
5. Para la correcta limpieza de la camilla siga las instrucciones al respaldo.



1. Posición segura de ingreso y egreso de paciente: Camilla en Altura Mínima.
2. Antes de realizar cualquier movimiento verifique que el atril porta suero no choque con ningún objeto, pared o techo.
3. Siempre asegúrese que no hayan obstáculos (personas, objetos, accesorios, entre otros), antes de cualquier movimiento de la camilla.
4. La camilla debe tener las barandas arriba siempre que se encuentre en uso.
5. Para la correcta limpieza de la camilla siga las instrucciones al respaldo.

Protocolo de Limpieza

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca **LOS PINOS®** es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso.



Utilizar químicos de limpieza a base de:

- A. Peróxido Orgánico.
- B. Ácido Acético.
- C. Biguadina Polimérica.
- D. Tensoactivos Aniónicos.



Nunca Utilizar:

- A. Cloro
- B. Hipoclorito
- C. Amonios Cuaternarios
- D. Alcalino Clorado

- 1** : Seguir las instrucciones de correcta titulación del químico dadas por el fabricante del mismo (% de concentración).



- 2** : Bajo ninguna circunstancia aplique los químicos sin ser diluidos.



- 3** : Humedecer (sin saturar) un paño limpio con el químico a utilizar. Verifique que este no quede goteando.



- 4** : Aplicar el producto sobre la zonas de mayor contacto con el paciente y/o los agentes contaminantes. Dejar reposar por un tiempo no mayor a 1 minuto.



- 5** : Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.



- 6** : En caso de tener desprendimiento de pintura por cualquier causa, comuníquese con LOS PINOS para realizar la reparación y evitar oxidación química.



- 7** : En caso de identificar una mancha de óxido sin desprendimiento de pintura, humedezca un paño con agua y frote con fuerza hasta eliminar la mancha superficial. Verifique que la superficie quede completamente seca.



- 8** : No realice la limpieza del equipo utilizando elementos a presión. (Mangueras o hidrolavadoras).



- 9** : Para la limpieza de los componentes electrónicos, desconecte el equipo y limpie con un paño húmedo, garantizando que no se almacenen líquidos dentro de las conexiones. Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.



En caso de presentar novedades con las protecciones superficiales o componentes comuníquese con Industrias Metálicas Los Pinos. No seguir las recomendaciones indicadas podría causar la pérdida de garantía del equipo.

Protocolo de Limpieza

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca **LOS PINOS®** es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso.



Utilizar químicos de limpieza a base de:

- A. Peróxido Orgánico.
- B. Ácido Acético.
- C. Biguadina Polimérica.
- D. Tensoactivos Aniónicos.



Nunca Utilizar:

- A. Cloro
- B. Hipoclorito
- C. Amonios Cuaternarios
- D. Alcalino Clorado

- 1** : Seguir las instrucciones de correcta titulación del químico dadas por el fabricante del mismo (% de concentración).



- 2** : Bajo ninguna circunstancia aplique los químicos sin ser diluidos.



- 3** : Humedecer (sin saturar) un paño limpio con el químico a utilizar. Verifique que este no quede goteando.



- 4** : Aplicar el producto sobre la zonas de mayor contacto con el paciente y/o los agentes contaminantes. Dejar reposar por un tiempo no mayor a 1 minuto.



- 5** : Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.



- 6** : En caso de tener desprendimiento de pintura por cualquier causa, comuníquese con LOS PINOS para realizar la reparación y evitar oxidación química.



- 7** : En caso de identificar una mancha de óxido sin desprendimiento de pintura, humedezca un paño con agua y frote con fuerza hasta eliminar la mancha superficial. Verifique que la superficie quede completamente seca.



- 8** : No realice la limpieza del equipo utilizando elementos a presión. (Mangueras o hidrolavadoras).



- 9** : Para la limpieza de los componentes electrónicos, desconecte el equipo y limpie con un paño húmedo, garantizando que no se almacenen líquidos dentro de las conexiones. Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.



En caso de presentar novedades con las protecciones superficiales o componentes comuníquese con Industrias Metálicas Los Pinos. No seguir las recomendaciones indicadas podría causar la pérdida de garantía del equipo.