

Instrucciones de Cuidado y Limpieza

Colchón Hospitalario DELUXE



Características del Forro

Composición: Película PVC/Etilen interpolímero flexible con refuerzo de poliéster texturizado.

Propiedades: 100% impermeable, con tratamiento antibacterial y protección biocida.

Textura: Lisa, que facilita la limpieza y no permite acumulación de polvo y suciedad.

Productos Recomendados

Resistencia Química Tipo A - Excelente

✓ Desinfectantes Apropriados

- Hipoclorito de sodio al 5,25%
- Hipoclorito de sodio al 13%
- Yodopolividona al 10%
- Solución de cloro al 20%
- Detergente neutro al 2%
- Jabón neutro al 1%

✓ Otros Productos Seguros

- Alcohol etílico
- Alcohol metílico
- Amoniaco
- Agua con sal (25%)
- Formaldehído (37%)
- Glicerina

Limpieza Diaria

Procedimiento de Limpieza Diaria

1. Preparación

- Retirar objetos y equipos de la superficie.
- Usar equipo de protección personal apropiado.

2. Limpieza Inicial

- Limpiar con paño húmedo para remover polvo y suciedad superficial.
- Usar movimientos unidireccionales.

3. Desinfección

- Aplicar el desinfectante con un paño limpio.
- Dejar actuar según indicaciones del fabricante del desinfectante.
- No mezclar diferentes productos químicos.

4. Enjuague (si es necesario)

- Usar agua limpia para remover residuos del desinfectante.
- Secar con paño limpio y seco.

Limpieza Profunda

Frecuencia

- Semanal o según protocolo hospitalario.
- Después de procedimientos que involucren fluidos corporales.

Procedimiento Intensivo

1. Pre-Limpieza

- Remover materia orgánica visible (sangre, fluidos).
- Usar solución de agua con detergente neutro.

2. Desinfección Profunda

- Aplicar hipoclorito de sodio al 13% para máxima eficacia.
- Tiempo de contacto: mínimo 10 minutos.
- Cubrir toda la superficie uniformemente.

3. Aclarado Final

- Enjuagar con agua limpia.
- Secar completamente antes del uso.