

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca LOS PINOS es necesario seguir las siguientes instrucciones de USO

CONTROLES MANTENER PRESIONADO EL BOTÓN HASTA LLEGAR A LA POSICIÓN DESEADA



LLEVA LA CUNA A SU MÁXIMA ALTURA

SISTEMA DE FRENO



Freno desactivado

Freno activado



Para desplazar la cama asegúrese que no esté frenada, además desconecte el suministro eléctrico.

Bajar barandas

BARANDAS

- Ubicarse en frente de la baranda.
- Presionar las balas del seguro al mismo tiempo hacia el interior de la baranda.
- Descienda la baranda con un poco de presión hasta que esta quede ubicada a la altura del tendido (tope inferior).

Subir barandas

- Para colocar la baranda en posición de servicio se debe:
- Ubicarse de frente de la baranda, y subir la baranda hasta que la bala entre en el seguro.
 - Verifique que la baranda quede totalmente asegurada en ambos lado de la cama (espaldar y pies).

1. Posición segura de ingreso y egreso de paciente: Cuna en Altura Mínima.
2. Antes de realizar cualquier movimiento verifique que el atril portasuero no choque con ningún objeto, pared o techo.
3. Siempre asegúrese que no hayan obstáculos (personas, objetos, accesorios, entre otros), antes de cualquier movimiento de la cama.
4. La cuna debe tener las barandas arriba y los tableros ubicados siempre que se encuentre en uso.
5. Para la correcta limpieza de la cama siga las instrucciones al respaldo.



Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca LOS PINOS es necesario seguir las siguientes recomendaciones de limpieza.



Utilizar químicos de limpieza a base de:

- a. Peróxido Orgánico.
- b. Ácido Acético.
- c. Biguadina Polimérica.
- d. Tensoactivos Aniónicos.



NUNCA UTILIZAR

- a. Cloro.
- b. Hipoclorito.
- c. Amonios Cuaternarios.
- d. Alcalino Clorado.

1. Seguir las instrucciones de correcta titulación del químico dadas por el fabricante del mismo (% de concentración).

2. Bajo ninguna circunstancia aplique los químicos *sin ser diluidos*.

3. Humedecer (sin saturar) un paño limpio con el químico a utilizar. Verifique que este no quede goteando.

4. Aplicar el producto sobre las zonas de mayor contacto con el paciente y/o los agentes contaminantes.

5. Dejar reposar por un tiempo no mayor a 1 minuto.


6. Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.

7. En caso de tener desprendimiento de pintura por cualquier causa, comuníquese con **LOS PINOS** para realizar la reparación y evitar oxidación química.

8. En caso de identificar una mancha de óxido sin desprendimiento de pintura, humedezca un paño con agua y frote con fuerza hasta eliminar la mancha superficial. Verifique que la superficie quede completamente seca.

9. No realice la limpieza del equipo utilizando elementos a presión.
(Mangueras o hidrolavadoras).

10. Para la limpieza de los componentes electrónicos, desconecte el equipo y limpie con un paño húmedo, garantizando que no se almacenen líquidos dentro de las conexiones. Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.

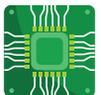

En caso de presentar novedades con las protecciones superficiales o componentes comuníquese con **Industrias Metálicas Los Pinos**. No seguir las recomendaciones indicadas podría causar la pérdida de garantía del equipo.

CONTACTO

PBX: (604) 372 30 31

Línea Gratuita Nacional 01 8000 180 654

Chatee con nosotros en www.lospinos-sa.com

Escríbanos a serviciotecnico@lospinos-sa.com

**LÍNEA
CENTAURO**