

Camilla de Exámen Ginecológica C-379^{GYN}



**Manual de
Instalación**

:

**Manual de
Usuario**

:

**Manual de
Servicios**



Contenido

Presentación	4
Símbolos	5
Manual de Instalación	6
1. Partes Generales	7
2. Características y Especificaciones Generales	8
3. Empaque y Desempaque	9
3.1. Información del Empaque	9
3.2. Condiciones Ambientales para Empaque y Almacenamiento	9
3.3. Guía de Desempaque	9
Manual de Usuario	10
4. Funciones Básicas	11
4.1. Accionamiento del Espaldar	11
4.2. Sistema de Freno Individual	12
Manual de Servicio	13
5. Limpieza	14
6. Precauciones y Seguridad	15
7. Garantía	16

Presentación

Felicitaciones el producto que acaba de adquirir cuenta con el desarrollo más completo de las especificaciones técnicas del mercado, con el fin de dar un mayor servicio a los usuarios de nuestros productos.

Las exigencias de la compañía para garantizar productos con una mayor fiabilidad y garantía en cuidados médicos, hacen para Industrias Metálicas Los Pinos S.A. un reto el día a día, reto que asumimos con convicción y alegría pensando en nuestros clientes.

Nuestros productos están diseñados para cumplir con todos los requisitos de funcionalidad y calidad del mercado, además cuenta con el servicio técnico y la garantía de Los Pinos; gracias a lo anterior usted puede disfrutar de nuestros productos tranquilamente.

Agradecemos la confianza que ha depositado en nuestro trabajo, seguros de que este producto llena todas sus expectativas en cuanto a funcionalidad, calidad y servicio se refiere.

Le recomendamos leer completamente la información contenida en el presente manual antes de comenzar la operación del equipo.

Símbolos




¡Atención!
Consultar
Documentos de
Acompañamiento



**Riesgo de
Pinzamiento**



**Equipo
Tipo B**

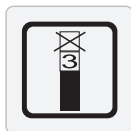

**Límite de
Apilamiento**



**Abrir con
Cuidado**




**Lado Hacia
Arriba**



**Manejar con
Cuidado**



Frágil

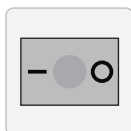


**Interruptor de
Encendido y
Apagado**



**Corriente
Alterna**



**Para Tener
en Cuenta**

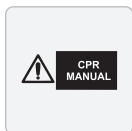

**Accionamiento
Manual CPR**




**Conexión
a Tierra**



Equipotencialidad



Reciclar

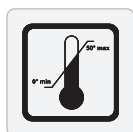

**Límite de
Temperaturas**



**No Usar
Ganchos**



**Mantener
Vertical**



**Protéjase de
la Humedad**



**Placa de
Identificación
de la Cama**



**Compatibilidad
Electromagnética**



**Colchones
Incompatibles
Riesgosos**



**Características
Especiales u
Opcionales**



Manual de Instalación

1. Partes Generales



A. Soporte Rollo

B. Tapicería Espalдар

C. Palanca Accionador Espalдар

D. Estructura Base

E. Freno

F. Ruedas

G. Cremallera

H. Tapicería Pies

I. Corveras


J. Tapicería Asiento

K. Barandas

2. Características y Especificaciones Generales

Largo	178cm +/- 1cm
Ancho	64cm +/- 1cm
Alto	82cm +/- 1cm
Inclinación del Espaldar	80° +/- 2°
Capacidad de Carga	120kg

- **Estructura:** Fabricada en tubería redonda de 1" de acero cold rolled resistente a la aplicación de desinfectantes de grado hospitalario.
- **Acabado:** Posee un acabado con pintura de aplicación electrostática que aumenta la resistencia, la adhesión y la protección ante la corrosión.
- **Tapizado:** Tapizado en cordobán, lavable, tapiz de 12 mm de espesor y acolchado con espuma de 2".
- **Elevación del Espaldar:** El movimiento del espaldar se realiza mediante sistema nudo permitiendo así el ajuste con comodidad y seguridad del paciente.
- **Elevación de Pies:** El movimiento del piecero se realiza mediante sistema de cercha.
- **Logística:** Para efectos de logística la camilla es ensamblable por sistemas.

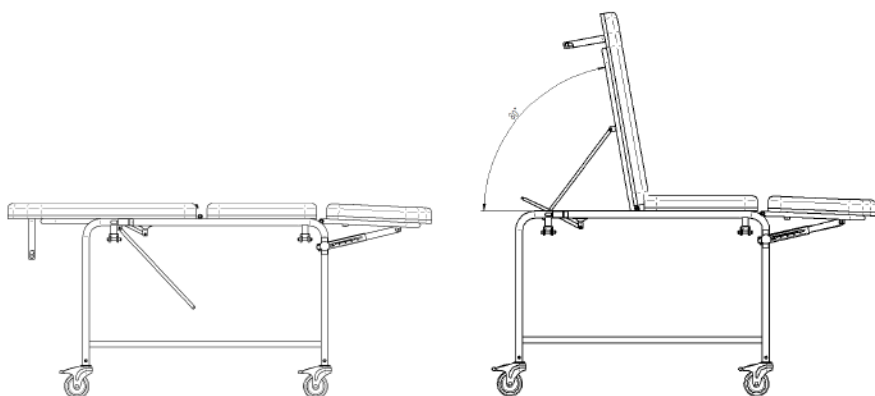

Las anteriores figuras representan las diferentes posiciones que puede adoptar la cama, mas no comprometen la forma física o funcionamiento de la misma.

3. Empaque y Desempaque

3.1. Información del Empaque

Dimensiones Totales
210^{cm} x 100^{cm} x 83^{cm}



Peso Bruto con Empaque
40^{kg}



Utilice maquinaria para movilizar el empaque.

3.2. Condiciones Ambientales para Empaque y Almacenamiento

Temperatura
10^{°c} a 40^{°c}




Humedad
30 a 75%




Cantidad Apilable
3 Unidades


3.3. Guía de Desempaque

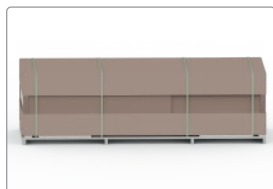

Empaque original.

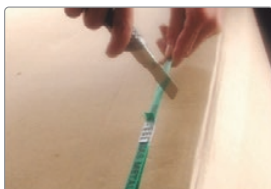


Corte el suncho que envuelve la caja.

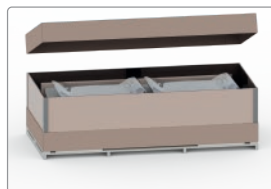

Destape la caja.



Retire la cubierta lateral.

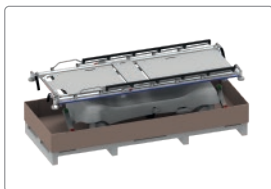

Levante cada una de las esquinas de la estructura superior.



Estas imágenes son de referencia, el producto que se muestra en ellas puede ser diferente al que se describe en este manual.



Manual de Usuario

4. Funciones Básicas

4.1. Accionamiento del Espaldar

Para elevar o bajar el espaldar, accione la palanca ubicada justo debajo de la superficie espaldar, lleve a la inclinación deseada y suelte.




4.2. Sistema de Freno Individual

.La camilla cuenta con 4 ruedas con freno individual de fácil accionamiento.


Accionar el freno de las ruedas

Accione con el pie el pedal de freno de la rueda hasta que este haga presión en la misma como indica la figura hasta escuchar un "clic".

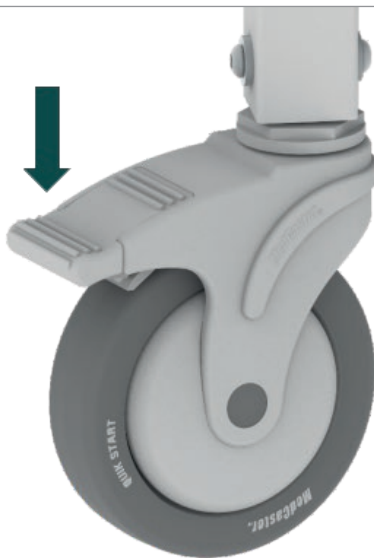

Quitar el freno de las ruedas

Accione con el pie la pestaña que se encuentre levantada en la rueda al realizar esta acción usted escuchara un "clic" y en este momento la rueda estará libre.

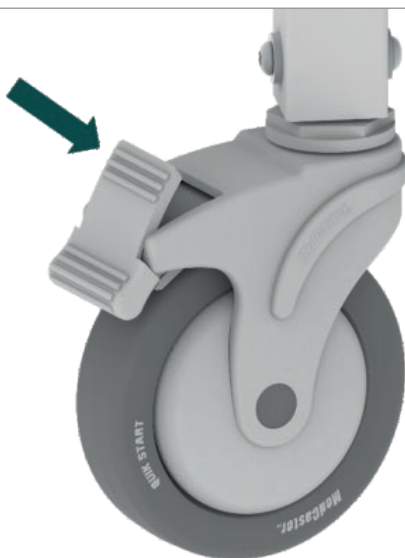



Manual de Servicio

5. Limpieza

Indicaciones Preliminares

Para iniciar el proceso de limpieza de la camilla debe asegurarse que la camilla se encuentre disponible, sin paciente.

Limpieza de Estructura Inoxidable

Para la limpieza de estas piezas se debe emplear un trapo semihúmedo con el limpiador, una vez hecho esto, seque los excesos de humedad.

Esta limpieza debe hacerse con frecuencia mínimo de una semana si el producto se encuentra en un área muy húmeda o salina.

No emplear líquidos corrosivos como hipoclorito, detergentes, ácidos y disolventes por que afectan el acabado de la camilla en su apariencia inmediatamente o secuencialmente.

Limpieza de Tendidos

Se debe emplear un trapo semihúmedo, impregnado con el limpiador para retirar partículas de polvo y líquidos o fluidos. **No se debe emplear líquidos corrosivos como tinner o disolventes para no afectar la tapicería.** Tener precaución de emplear mucho líquido u agua (evitar los excesos de humedad).

Limpieza de Barandas

Para la limpieza de estas piezas se debe emplear un trapo semihúmedo con el limpiador, una vez hecho esto, seque los excesos de humedad.

Esta limpieza debe hacerse con frecuencia mínimo de una semana. Si el producto cromado está expuesto constantemente a ambientes grasosos o salinos, debe hacerse todos los días para mitigar los efectos corrosivos.

Esta recomendación es para el empleo de cualquier limpiador desinfectante como el hipoclorito, pero evitar el uso de ácidos, disolventes y detergentes, pues estos pueden arruinar la película de cromo de las piezas y/o dañar su apariencia inmediatamente o secuencialmente.



No se debe emplear chorros de agua, autoclaves u otros métodos de limpieza o desinfección sobre las camillas, diferentes a los sugeridos anteriormente.

Recuerde que se debe realizar mantenimiento general mínimo cada seis (6) meses para garantizar el buen funcionamiento de la camilla. Para mayor seguridad realizar limpiezas y lubricaciones periódicas por lo menos cada dos meses.

6. Precauciones y Seguridad

Advertencias y Recomendaciones de Uso General

Además de las descritas a lo largo de todo este manual se describen las siguientes:

Industrias Metálicas Los Pinos S.A. no se hace responsable por daños ocasionados por la instalación de estructuras o equipos que sean producidas por otros fabricantes, como tampoco por el maltrato o el uso de cualquiera de sus funciones o partes para un fin distinto al descrito en este manual.

7. Garantía

Industrias Metálicas Los Pinos S.A ofrece garantía en todos los productos marca Los Pinos por dos (2) años por defectos de fabricación, a partir de la fecha de entrega e instalación.

Las garantías serán dadas directamente en el sitio de funcionamiento de los productos en caso de no requerirse su traslado al punto de venta ó fábrica y serán cambiadas sin costo alguno aquellas piezas que se encuentren defectuosas en su manufactura dentro del período de la garantía.

Causales de Pérdida de Garantía

Uso indebido no conforme a las recomendaciones y advertencias del manual, maltrato, desgaste natural, empleo de sustancias corrosivas.

No gozarán de garantía aquellas piezas que presenten fallas por usos inadecuados ó artículos reparados por terceros, como tampoco la pérdida de partes y accesorios en caso de que los productos sean extraídos de su embalaje antes de la entrega oficial por un funcionario de Los Pinos ó sin previa autorización.



Nuestros productos están identificados con una placa numerada con el fin de llevar su trazabilidad.

Si esta placa es removida el producto pierde toda garantía.









Industrias Metálicas Los Pinos S.A

PBX: (+57) 604 372 3031

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 180 654

Calle 67B #45A - 82, Itagüí - Colombia

info@lospinos-sa.com | www.lospinos.com.co

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La garantía otorgada por Industrias Metálicas Los Pinos es la garantía expresa escrita concedida con la venta de productos.