

Camilla C-379^{2PL}



**Manual de
Instalación**

:

**Manual de
Usuario**

:

**Manual de
Servicios**



Contenido

Presentación	4
Símbolos	5
Manual de Instalación	6
1. Partes Generales	7
2. Características y Especificaciones Generales	8
3. Empaque y Desempaque	9
Manual de Usuario	10
4. Accionamiento del Espaldar	11
Manual de Servicio	12
5. Limpieza	13
6. Precauciones y Seguridad	14
7. Garantía	15

Presentación

Felicitaciones el producto que acaba de adquirir cuenta con el desarrollo más completo de las especificaciones técnicas del mercado, con el fin de dar un mayor servicio a los usuarios de nuestros productos.

Las exigencias de la compañía para garantizar productos con una mayor fiabilidad y garantía en cuidados médicos, hacen para Industrias Metálicas Los Pinos S.A. un reto el día a día, reto que asumimos con convicción y alegría pensando en nuestros clientes.

Nuestros productos están diseñados para cumplir con todos los requisitos de funcionalidad y calidad del mercado, además cuenta con el servicio técnico y la garantía de Los Pinos; gracias a lo anterior usted puede disfrutar de nuestros productos tranquilamente.

Agradecemos la confianza que ha depositado en nuestro trabajo, seguros de que este producto llena todas sus expectativas en cuanto a funcionalidad, calidad y servicio se refiere.

Le recomendamos leer completamente la información contenida en el presente manual antes de comenzar la operación del equipo.

Símbolos




¡Atención!
Consultar
Documentos de
Acompañamiento



**Riesgo de
Pinzamiento**



**Equipo
Tipo B**

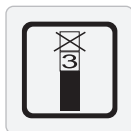

**Límite de
Apilamiento**



**Abrir con
Cuidado**




**Lado Hacia
Arriba**



**Manejar con
Cuidado**



Frágil

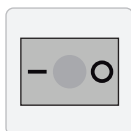


**Interruptor de
Encendido y
Apagado**



**Corriente
Alterna**



**Para Tener
en Cuenta**

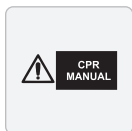

**Accionamiento
Manual CPR**




**Conexión
a Tierra**



Equipotencialidad



Reciclar

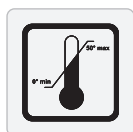

**Límite de
Temperaturas**



**No Usar
Ganchos**



**Mantener
Vertical**



**Protéjase de
la Humedad**



**Placa de
Identificación
de la Cama**



**Compatibilidad
Electromagnética**



**Colchones
Incompatibles
Riesgosos**



**Características
Especiales u
Opcionales**



Manual de Instalación

1. Partes Generales



A Tapicería Fija

B Accionador del Espaldar

C Soporte para Rollo

D Sección Pies

E Tapicería Espaldar

F Tapón Patas

2. Características y Especificaciones Generales

Dimensiones de la Superficie del Paciente

Largo: 198cm | Ancho: 60cm | Alto: 88cm

Capacidad de Carga

150^{kg} Paciente

••Estructura

Fabricada en tubería redonda de 1" de diámetro con tacos protectores en las 4 patas.

••Tapizado

El tapizado de la camilla está fabricado en cordobán.


- Es lavable
- Tiene 12 mm de espesor
- El acolchado está fabricado con espuma de alta densidad 30 y grosor de 5 cm.

••Acabado

En pintura en polvo electrostática color blanco, aplicado mediante un sistema automático de alta tecnología, que aumenta la resistencia, la adhesión, profundidad y la protección ante la corrosión.

••Ensamble

Para efectos de logística la camilla es ensamblable por sistemas.

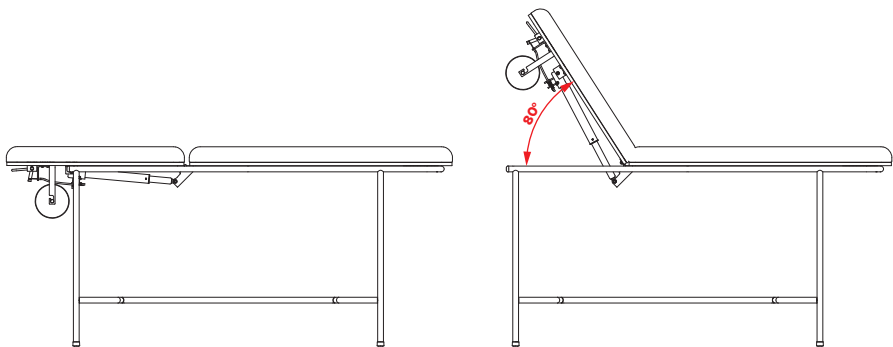

Las anteriores figuras representan las diferentes posiciones que puede adoptar la cama, mas no comprometen la forma física o funcionamiento de la misma.

3. Empaque y Desempaque

Dimensiones Totales

210^{cm} x 100^{cm} x 83^{cm}

Peso Bruto con Empaque

40^{kg}

Condiciones Ambientales para el Empaque y Desempaque

Temperatura

10°C a 40°C

Humedad


30 a 75%

Cantidad Apilable


3 Unidades



Utilice maquinaria para movilizar el empaque.

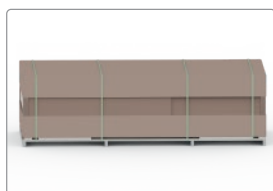

Empaque original.

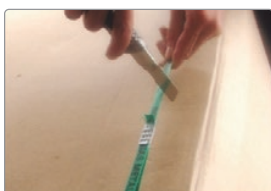

Corte el suncho que envuelve la caja.



Destape la caja.



Retire la cubierta lateral.



Levante la camilla de la base.



Estas imágenes son de referencia, el producto que se muestra en ellas puede ser diferente al que se describe en este manual.



Manual de Usuario

4. Accionamiento del Espaldar

Para elevar o bajar el espaldar, accione la palanca ubicada justo debajo de la superficie del espaldar, lleve a la inclinación deseada y suelte.





Manual de Servicio

5. Limpieza

Limpieza de Estructura Inoxidable

Para la limpieza de estas piezas se debe emplear un trapo semihúmedo con el limpiador, una vez hecho esto, seque los excesos de humedad.

Esta limpieza debe hacerse con frecuencia mínimo de una semana si el producto se encuentra en un área muy húmeda o salina.

No emplear líquidos corrosivos como hipoclorito, detergentes, ácidos y disolventes por que afectan el acabado de la camilla en su apariencia inmediatamente o secuencialmente.

Conservar la camilla con los tapones en la patas para evitar filtración de líquidos en la estructura.

Limpieza de Tendidos

Se debe emplear un trapo semihúmedo, impregnado con el limpiador para retirar partículas de polvo y líquidos o fluidos. **No se debe emplear líquidos corrosivos como tinner o disolventes para no afectar la tapicería.** Tener precaución de emplear mucho líquido u agua (evitar los excesos de humedad).



No se debe emplear chorros de agua, autoclaves u otros métodos de limpieza o desinfección sobre las camillas, diferentes a los sugeridos anteriormente.

Recuerde que se debe realizar mantenimiento general mínimo cada seis (6) meses para garantizar el buen funcionamiento de la camilla. Para mayor seguridad realizar limpiezas y lubricaciones periódicas por lo menos cada dos meses.

6. Precauciones y Seguridad

Advertencias y Recomendaciones de Uso General

Además de las descritas a lo largo de todo este manual se describen las siguientes:

Industrias Metálicas Los Pinos S.A. no se hace responsable por daños ocasionados por la instalación de estructuras o equipos que sean producidas por otros fabricantes, como tampoco por el maltrato o el uso de cualquiera de sus funciones o partes para un fin distinto al descrito en este manual.

7. Garantía

Industrias Metálicas Los Pinos S.A ofrece garantía en todos los productos marca Los Pinos por dos (2) años por defectos de fabricación, a partir de la fecha de entrega e instalación.

Las garantías serán dadas directamente en el sitio de funcionamiento de los productos en caso de no requerirse su traslado al punto de venta ó fábrica y serán cambiadas sin costo alguno aquellas piezas que se encuentren defectuosas en su manufactura dentro del período de la garantía.

Causales de Pérdida de Garantía

Uso indebido no conforme a las recomendaciones y advertencias del manual, maltrato, desgaste natural, empleo de sustancias corrosivas.

No gozarán de garantía aquellas piezas que presenten fallas por usos inadecuados ó artículos reparados por terceros, como tampoco la pérdida de partes y accesorios en caso de que los productos sean extraídos de su embalaje antes de la entrega oficial por un funcionario de Los Pinos ó sin previa autorización.



Industrias Metálicas Los Pinos S.A

PBX: (+57) 604 372 3031

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 180 654

Calle 67B #45A - 82, Itagüí - Colombia

info@lospinos-sa.com | www.lospinos.com.co

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La garantía otorgada por Industrias Metálicas Los Pinos es la garantía expresa escrita concedida con la venta de productos.