

# Cuna C-401TREND

los pinos  
Mejora tu Vida



**Manual de  
Instalación**

:

**Manual de  
Usuario**

:

**Manual de  
Servicios**



los pinos  
Mejora tu Vida

# Contenido

<b>Presentación</b> .....	<b>4</b>
<b>Símbolos</b> .....	<b>5</b>
<b>Manual de Instalación</b> .....	<b>6</b>
<b>1. Condiciones de Uso</b> .....	<b>7</b>
1.1. Aclaraciones .....	7
1.2. Presentación del Producto .....	7
<b>2. Descripción</b> .....	<b>8</b>
2.1. Partes Generales .....	8
2.2. Especificaciones Técnicas .....	9
<b>Manual de Usuario</b> .....	<b>10</b>
<b>3. Funciones Básicas</b> .....	<b>11</b>
<b>Manual de Servicio</b> .....	<b>12</b>
<b>4. Limpieza</b> .....	<b>13</b>
4.1. Recomendaciones de Seguridad .....	13
4.2. Limpieza y Desinfección .....	13

## **Presentación**

Felicitaciones el producto que acaba de adquirir cuenta con el desarrollo más completo de las especificaciones técnicas del mercado, con el fin de dar un mayor servicio a los usuarios de nuestros productos.

Las exigencias de la compañía para garantizar productos con una mayor fiabilidad y garantía en cuidados médicos, hacen para Industrias Metálicas Los Pinos S.A. un reto el día a día, reto que asumimos con convicción y alegría pensando en nuestros clientes.

Nuestros productos están diseñados para cumplir con todos los requisitos de funcionalidad y calidad del mercado, además cuenta con el servicio técnico y la garantía de Los Pinos; gracias a lo anterior usted puede disfrutar de nuestros productos tranquilamente.

Agradecemos la confianza que ha depositado en nuestro trabajo, seguros de que este producto llena todas sus expectativas en cuanto a funcionalidad, calidad y servicio se refiere.

Le recomendamos leer completamente la información contenida en el presente manual antes de comenzar la operación del equipo.

## Símbolos



**¡Atención!**  
Consultar  
Documentos de  
Acompañamiento



**Riesgo de  
Pinzamiento**



**Equipo  
Tipo B**



**Límite de  
Apilamiento**



**Abrir con  
Cuidado**



**Lado Hacia  
Arriba**



**Manejar con  
Cuidado**



**Frágil**



**Protéjase de  
la Humedad**



**Reciclar**



**Para Tener  
en Cuenta**



**No Usar  
Ganchos**



**Mantener  
Vertical**



**Límite de  
Temperaturas**



**Placa de  
Identificación  
de la Cuna**



**Compatibilidad  
Electromagnética**



**Colchones  
Incompatibles  
Riesgosos**



# **Manual de Instalación**

# 1. Condiciones de Uso

## 1.1. Aclaraciones

Este manual contiene la información necesaria para la instalación, uso y manejo de la **Cuna C-401 Trend - Los Pinos**.

Estas cunas presentan múltiples opciones para ofrecer una configuración óptima a los pedidos del paciente por lo tanto se debe tener en cuenta las características y los posibles accesorios.

## 1.2. Presentación del Producto

La cuna C-401 Trend para uso hospitalario en entornos de aplicación 2 y 3 (Cuidados posquirúrgicos, pediátricos, ambulatorios, entre otros que requieran permanecer en un establecimiento médico con supervisión constante de personal capacitado). Busca complementar los servicios médicos con un sistema cómodo y versátil para la recuperación del paciente en cualquier lugar que requiera de una cuna neonatal hospitalaria.



El uso del producto para funciones que no estén especificadas en este manual genera la pérdida de la garantía.

## 2. Descripción

### 2.1. Partes Generales



Partes aplicables, las partes que tienen constante contacto con el paciente son:

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>A. Tarjetero de Identificación</b> | <b>E. Canastilla de Objetos</b>    |
| <b>B. Bacinete</b>                    | <b>F. Ruedas</b>                   |
| <b>C. Colchoneta</b>                  | <b>G. Accionador Trendelenburg</b> |
| <b>D. Manijas de Empuje</b>           |                                    |

**Peso de Paciente**  
5<sup>kg</sup>



**Capacidad de Carga**  
10<sup>kg</sup>

•• **Estructura**

Está fabricada en acero al carbono y con acabado en pintura epóxica con aplicación electrostática libre de plomo.

•• **Bacinete**

Está fabricado en acrílico transparente de 4mm de espesor, material resistente y duradero, apto para uso hospitalario. Su superficie es compatible con la limpieza frecuente mediante productos desinfectantes, sin que esto comprometa su integridad. Cuenta con aletas perimetrales que facilitan su manipulación segura cuando se encuentra fuera de la estructura de soporte.

•• **Ruedas**

La cuna está equipada con cuatro (4) ruedas de 3” con rodadura de caucho, diseñadas para facilitar un desplazamiento suave y silencioso. Este tipo de rodadura minimiza la acumulación de electricidad estática, favoreciendo un entorno seguro en áreas hospitalarias. Dos (2) de las ruedas incorporan sistema de freno, que permite inmovilizar la estructura de forma segura cuando sea necesario.

•• **Porta Tarjeta de Identificación**

El bacinete incluye un porta tarjeta de identificación del paciente, ubicado en la parte inferior de la cesta acrílica, en el lado piecero. Su posición permite una visualización clara de los datos del neonato sin interferir con la visibilidad ni el acceso al interior del bacinete.

•• **Colchoneta**

Fabricada en espuma de alta densidad que proporciona soporte y comodidad adecuados para el neonato. Cuenta con un forro impermeable, de fácil limpieza, que protege la espuma interior y garantiza condiciones higiénicas en todo momento.

◦ *Dimensiones: 29cm de ancho x 58cm de largo x 5cm de espesor.*

<b>Largo Externo</b>	78cm +/- 1cm
<b>Ancho Externo</b>	35cm +/- 1cm
<b>Altura</b>	85cm +/- 1cm



# **Manual de Usuario**

### 3. Funciones Básicas

1. Ubique siempre el bacinete de forma horizontal sobre la estructura base, asegurándose de que quede correctamente asentado y firme para evitar movimientos o deslizamientos accidentales.
2. No permita que niños manipulen la cuna. El uso inadecuado por parte de menores puede provocar accidentes.
3. Para ajustar la posición en Trendelenburg o Trendelenburg inverso, utilice la palanca accionadora. Esta acciona la cremallera que permite inclinar la superficie según la necesidad clínica del neonato.



**Palanca Accionadora  
de Trendelenburg y  
Trendelenburg Inverso**



Verifique que el trinquete del mecanismo esté correctamente insertado en una ranura segura antes de soltar la manija. Asegurarse de esta posición evita movimientos inesperados y garantiza la estabilidad del bacinete durante su uso.



# Manual de Servicio

## 4. Limpieza

### 4.1. Recomendaciones de Seguridad

- Accione los frenos y asegurese que la cuna no se mueva.
- No utilice lavado a vapor o a presión.
- No use agua a más de 60° C.
- Evite el exceso de humedad.

### 4.2. Limpieza y Desinfección

Las recomendaciones siguientes no reemplazan las empleadas generalmente por el hospital para la desinfección, solo queremos dar una pauta para prolongar la vida útil de la silla.

- Por ningún motivo deje las superficies húmedas, después de realizar la limpieza.
- Los productos de limpieza utilizados deben ser empleados en la forma y dosis de acuerdo con las especificaciones del fabricante.



- No utilice solventes de ninguna clase para la limpieza de la cuna.
- No utilice paños o cualquier superficie abrasiva.
- No emplee materiales abrasivos de limpieza para colchones.

### Indicaciones Preliminares

El acrílico utilizado en la fabricación del bacinete cuenta con una garantía de durabilidad de 10 años, según las especificaciones del fabricante. Esta garantía aplica bajo condiciones normales de uso hospitalario y con una adecuada limpieza y mantenimiento del material.

### Ruedas Plásticas

La limpieza de estas ruedas solo requiere un trapo semihúmedo para retirar las partículas de polvo.



los pinos  
Mejora tu Vida



los pinos  
Mejora tu Vida



**Industrias Metálicas Los Pinos S.A**

**PBX:** (+57) 604 372 3031

**Línea Gratuita Nacional:** 01 8000 180 654

Calle 67B #45A - 82, Itagüí - Colombia

[info@lospinos-sa.com](mailto:info@lospinos-sa.com) | [www.lospinos.com.co](http://www.lospinos.com.co)

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La garantía otorgada por Industrias Metálicas Los Pinos es la garantía expresa escrita concedida con la venta de productos.